

TIELLE®

NICHTHAFTEND

Nichthaftender Hydropolymerverband
Mit **LIQUA LOCK®** Technologie

STERILE	R
----------------	----------

DE Produktbeschreibung

Der nichthaftende TIELLE® Hydropolymerverband absorbiert Exsudat, hält bei wenig bis stark exsudierenden Wunden ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht und minimiert das Mazerationsrisiko. Der Kombination von Absorptionsvermögen und Dampfdurchlässigkeit kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Der Verband besteht aus einem Hydropolymer Schaum, einer hochabsorbierenden Vliesschicht und einem hochgradig atmungsaktiven Polyurethan-Filmträger.

Der nichthaftende TIELLE® Verband kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.

Indikationen

Der nichthaftende TIELLE® Verband ist für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden Wunden angezeigt.

Der nichthaftende TIELLE® Verband wird unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal bei den folgenden Anzeigen verwendet:

- Geschwüre der unteren Extremitäten
 - Venöse Geschwüre
 - Arterielle Geschwüre
 - Geschwüre gemischter Ätiologie
- Diabetische Geschwüre
- Entnahmestellen
- Druckgeschwüre
- Postoperative oder traumatische Wunden

Der nichthaftende TIELLE® Verband ist auch für die Verwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Verwendung des TIELLE® Verbands ist nicht angezeigt bei:

- Verbrennungen dritten Grades
- Läsionen mit aktiver Vaskulitis

Der nichthaftende TIELLE® Verband kann verwendet werden, falls sichtbare Anzeichen von Infektion im Wundbereich vorliegen - aber nur, wenn die eigentliche Ursache ordnungsgemäß ärztlich behandelt wird.

Nicht verwenden, wenn der Patient an einer bekannten Empfindlichkeit gegen irgendwelche Bestandteile des Verbands leidet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung der Stelle

1. Die Wunde gemäß Wundmanagementprotokoll vorbereiten.

Verbandapplikation

1. Einen geeignet großen Verband auswählen, sodass mindestens ein 1-cm-Rand den Wundrand überlappt.
2. Die Packung durch Abziehen öffnen und den Verband entnehmen.
3. Ggf. den Verband mit einer sterilen Schere auf die gewünschte Größe zuschneiden, bevor das Trennpapier entfernt wird. Nach dem Zuschneiden den restlichen Verband wegwerfen. Verbandfragmente nicht für die spätere Verwendung bei demselben Patienten oder anderen Patienten aufbewahren.
4. Das Trennpapier teilweise abziehen, um die Wundkontaktschicht des Verbandes freizulegen.
5. Den Verband mittig über der Wundstelle positionieren, wobei die Wundkontaktschicht zur Wunde zeigt. Das Trennpapier ganz abziehen und wegwerfen.
6. Der nichthaftende TIELLE® Verband kann mit einem geeigneten sekundären Verband gesichert werden.

7. Um potenzielles Anhaften bei sich verringernden Exsudatmengen zu vermeiden, ist die Verwendung des nichthaftenden TIELLE® Verbandes zusammen mit einem nichthaftenden Primärverband in Erwägung zu ziehen.

Der nichthaftende TIELLE® Verband hält ein feuchtes Wundheilungsmilieu aufrecht, fördert autolytisches Débridement und ermöglicht die Granulation unter optimalen Bedingungen. Die Läsionsgröße kann dadurch anfänglich zunehmen; dies ist normal und vor der Granulation zu erwarten.

Wechseln und Entfernen des Verbandes

Die Häufigkeit des Verbandwechsels wird durch gute Wundbehandlungspraxis bestimmt und hängt vom Zustand der Wunde und der umgebenden Haut ab. Der nichthaftende TIELLE® Verband kann je nach Exsudatmenge bis zu 7 Tage lang an Ort und Stelle bleiben.

Eventuelle sekundäre Fixierverbände entfernen. Den nichthaftenden TIELLE® Verband durch Erfassen einer Ecke und vorsichtiges Abziehen entfernen. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die korrekte Wundbehandlung jegliches Trauma der intakten Haut beim Entfernen vermeidet.

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Nicht wiederverwenden.

Nicht erneut sterilisieren.

Das Verfallsdatum dieses Produkts ist auf der Verpackung aufgedruckt.

DE AUF DEM ETIKETT VERWENDETE SYMBOLE



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch).



Nicht erneut sterilisieren.



Durch Bestrahlung sterilisiert.



Gebrauchsinformation beachten.



Vorsicht.



Lagern unter 30°C.

CE 0086

CE-Zeichen und Kennnummer der zuständigen Stelle.

REF

Katalognummer.



Siehe Gebrauchsinformation für Exsudatniveau.



Verwendbar bis.



Chargennummer.



Hersteller.



Bezeichnet Verband ohne Haftrand.



Bezeichnet die Anzahl Verbände (n) pro Packung.



Acelity™

519401T.b



©2018 Systagenix Wound Management Limited,
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, UK

CE
0086



2018-07